



การเก็บตัวอย่าง Swab จากระบบทางเดินหายใจ

Nasopharyngeal swab

1. เก็บโดยสอดหลอด Swab เข้าไปในรูจมูกถึงส่วนของ nasopharynx จนรู้สึกราวชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก ทิ้งไว้ประมาณ 5 วินาทีค่อยๆหมุนหลอด Swab 5 รอบ แล้วดึงออก
2. จุ่ม ปลาย swab ใส่ VTM/UTM
3. ตัดปลายหลอดส่วนเกินจากหลอดเก็บตัวอย่าง

Nasal swab

1. ใช้ swab สอดเข้าไปรูจมูกขนานกับ palate ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วินาที
2. ค่อยๆหมุน swab ออกจุ่มปลาย swab ใส่ VTM/UTM
3. หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท

Nasopharyngeal aspirate

1. เก็บโดยใช้สายพลาสติกที่ต่อกับเครื่องดูดสวไสเข้าไปในช่องจมูก
2. ดูดตัวอย่างประมาณ 2-3 มล. ใส่ VTM/UTM

Throat swab สำหรับ ไวรัส

1. ป้ายภายในบริเวณ posterior pharynx
2. จุ่มปลาย swab ใส่ VTM/UTM
3. หักด้าม swab ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท

Throat swab

1. ใช้ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อสัมผัสและหมุนซ้ำๆ บริเวณผนังลำคอด้านหลัง ต่อมทอนซิล และบริเวณที่มีการอักเสบและบวมแดง อย่าให้ไม้พันสำลีสัมผัสบริเวณอื่นๆภายในปาก
2. ใส่ไม้พันสำลีลงใน amies transport medium
3. นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

