



Fecal Occult Blood (Hemoglobin. Gastrointestinal in Stool)

TMLT CODE 300022

LOINC_NUM 2335-8

CGD_CODE 31203

การเตรียมผู้ป่วย Patient Preparation	1. ควรงดหรือควบคุมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เลือดสัตว์ ปลาดิบ และยาบางชนิดที่มีส่วนผสมของเหล็ก โบรไมด์ ไอโอดีน หรือวิตามิน ซี ถ้ามีปริมาณมากพอจะทำให้เกิดผลบวกปลอมได้ 2. ก่อนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ควรปัสสาวะทิ้งก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้
ตัวอย่างส่งตรวจ Specimen - Container	อุจจาระประมาณ 5-10 g. (ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย) กระปุกสีเทาที่มีฝาปิดพร้อมซองซ้อนพลาสติกป้ายอุจจาระ
วันทำการ Testing Schedule	ทุกวัน (เวลา 8.30 - 23.00 น.)
ประกันเวลา Turn Around Time	60 นาที
วิธีวิเคราะห์-หลักการ Methodology-Principle	chromatographic immunoassay
ค่าอ้างอิง Reference	Negative (cut off < 50 ng/mL)
หน่วย Unit	ไม่มี
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ไม่มี





แนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. วิธีการเก็บอุจจาระ : ควรเป็นอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ ไม่ควรค้างคืน เลือกเก็บบริเวณที่มีพยาธิสภาพ เช่น มีสีดำ มีมูก มีเลือดปน หรือส่วนที่มีลักษณะคล้ายตัวหนอนหรือพยาธิปนอยู่ และไม่ควรมีปัสสาวะหรือน้ำล้างอื่นๆปนเปื้อน
2. หากมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว หรือท้องผูก ควรรักษาให้หายแล้วค่อยตรวจ
3. เลี่ยงการเก็บอุจจาระขณะที่มีรอบเดือนหรือเป็นริดสีดวงทวาร
4. เลือดจะคงสภาพอยู่ในอุจจาระได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง จึงควรส่งห้องปฏิบัติการทันที
5. ยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออาจเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

