



Specific gravity of Urine

TMLT CODE 310014

LOINC_NUM 2965-2

CGD_CODE 31002

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

Urine Cup (กระปุกใส่ฝาสีเหลือง)

ปัสสาวะช่วงกลาง (midstream urine) ปริมาตร 10-20 ml.

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

Refractive index

ค่าอ้างอิง

Reference

1.003 - 1.035

หน่วย

Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม

(Time limit for requesting additional test)

-

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. หากปัสสาวะขุ่นมากควรนำไปปั่นแล้วนำส่วนใสมาวัดความถ่วงจำเพาะ
2. ถ้าค่าความถ่วงจำเพาะสูงกว่า 1.050 ต้องเจือจางปัสสาวะด้วยน้ำกลั่น 1:2 แล้วจึงวัดใหม่ ค่าที่ได้คูณตัวเลขสองหน่วยสุดท้ายของค่าด้วย Dilution factor คือ 2
3. การหยดปัสสาวะควรหยดลงบริเวณกึ่งกลางปริซึม ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ เพราะจะทำให้ค่าความถ่วงจำเพาะคลาดเคลื่อน

