



Stool Reducing substances

TMLT CODE 320525

LOINC_NUM 11060-1

CGD_CODE

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

ไม่มี

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

อุจจาระประมาณ 5-10 g. (ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย)

กระปุกสีเทามีฝาปิดพร้อมซองซองพลาสติกป้ายอุจจาระ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (เวลา 8.30 - 23.00 น.)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์-หลักการ

Methodology-Principle

ตรวจโดยใช้แถบทดสอบ (reagent strip) จะอาศัยหลักการของปฏิกิริยาของสารที่ต้องการตรวจหา กับสารที่เคลือบไว้บนแถบทดสอบและมี indicator เป็นตัวช่วยแสดงให้เห็นผลของปฏิกิริยาโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของสี ซึ่งจะเปลี่ยนตามปริมาณของสารที่ต้องการตรวจ

ค่าอ้างอิง

Reference

Negative

หน่วย

Unit

ไม่มี

ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้

(Time limit for requesting additional test)

ไม่มี

คำแนะนำเพิ่มเติม

Comment

1. ควรเป็นอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ ไม่ควรค้างคืน
2. ควรเก็บอุจจาระในกระปุกเก็บอุจจาระและตรวจภายใน 30 นาที เนื่องจากหากทิ้งไว้นานเกินไปเชื้อแบคทีเรียอื่นในอุจจาระย่อยสลายน้ำตาลไปหมดจนทำให้แปลผลผิดพลาดได้

